

Instruções de Coleta EDTA


O envio de amostra deve ser realizado no mesmo dia da coleta. Desta forma não há necessidade de acondicionamento especial, podendo permanecer em temperatura ambiente até o nosso recebimento. **O laboratório funciona para recebimento de amostras de 2ª à 6ª feira das 8:00 às 17:00h.** Evite enviar amostras às 6ªs feiras e vésperas de feriados, de forma que a amostra permaneça o menor período possível em trânsito.

1 Coleta do sangue



Antes de começar, **calçar as luvas**. Fazer a assepsia do local a ser punccionado com álcool a 70%. Fazer a coleta venosa de aproximadamente 5 mL.

3 Armazenagem

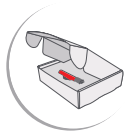


Colocar o tubo EDTA em um saco transparente. Encaixar o tubo no berço, colocar os documentos preenchidos, pedido médico e ficha financeira em cima do tubo e lacrar a caixa. **Transportar em temperatura ambiente.**

2 Tubo EDTA



Coletar sangue venoso em **1 tubo EDTA** (tubo de tampa roxa). Coletar cerca de 4mL de sangue no tubo. Verter o tubo 10 vezes para homogeneizar.

4 Envio

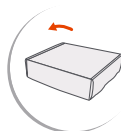

Envie para o endereço:
HAOMA
Rua Manoel Coelho, 845 -
Bairro Santo Antônio
São Caetano do Sul, SP
09510-112